

PEHA-HAFT



Descrição

Peha-Haft é uma bandagem e/ou atadura elástica, autoaderente e permeável. Sua textura é diferenciada e sua elasticidade é de aproximadamente 80%. Peha-Haft assegura uma fixação segura e confortável. Não adere a pele ou a roupa. Sua composição livre de látex é ideal para peles sensíveis.

Indicação

Fixação de coberturas primárias e secundárias, talas, cateteres e cânulas, principalmente nas articulações e em áreas de difícil fixação. Possui baixo efeito de mobilização.

Composição

Algodão, Poliamida e Viscose.

Apresentação

CÓDIGO	TAMANHO DO PRODUTO	QUANTIDADE POR CAIXA
932441-3	4 m x 4 cm	1
932443	4 m x 8 cm	1
932444	4 m x 10 cm	1

Instruções de uso

Posicionar a bandagem ao redor da área desejada e fazer uma leve pressão para que as extremidades fiquem aderidas e fixas de modo seguro. Não esticar a bandagem além do necessário para manter a circulação adequada do membro.

Precauções

Não deve ser utilizado diretamente sobre a ferida. Produto de uso único. Não estéril. Manter longe do alcance de crianças.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170310018

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenuau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteados de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
 CEP 06460-040 – Tamboré - Barueri - SP
 Telefone: (11) 3168-0226
 comercial@hartmannbr.info - hartmann.info/pt-BR

