

# VENOFIX® SAFETY

## ORIENTAÇÃO DE USO




### Punção

Mantenha as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar de sua instituição. Realize a assepsia conforme o protocolo institucional. Introduza o Venofix® Safety com o bisel voltado para cima, com um ângulo aproximado entre 10 e 20 graus. O refluxo de sangue confirma que o Venofix® Safety está na veia.



### Fixação

Fixar de maneira que o mecanismo de segurança permaneça livre para que possa ser ativado quando necessário. Permitir a visualização do sítio de punção, para avaliação do mesmo.

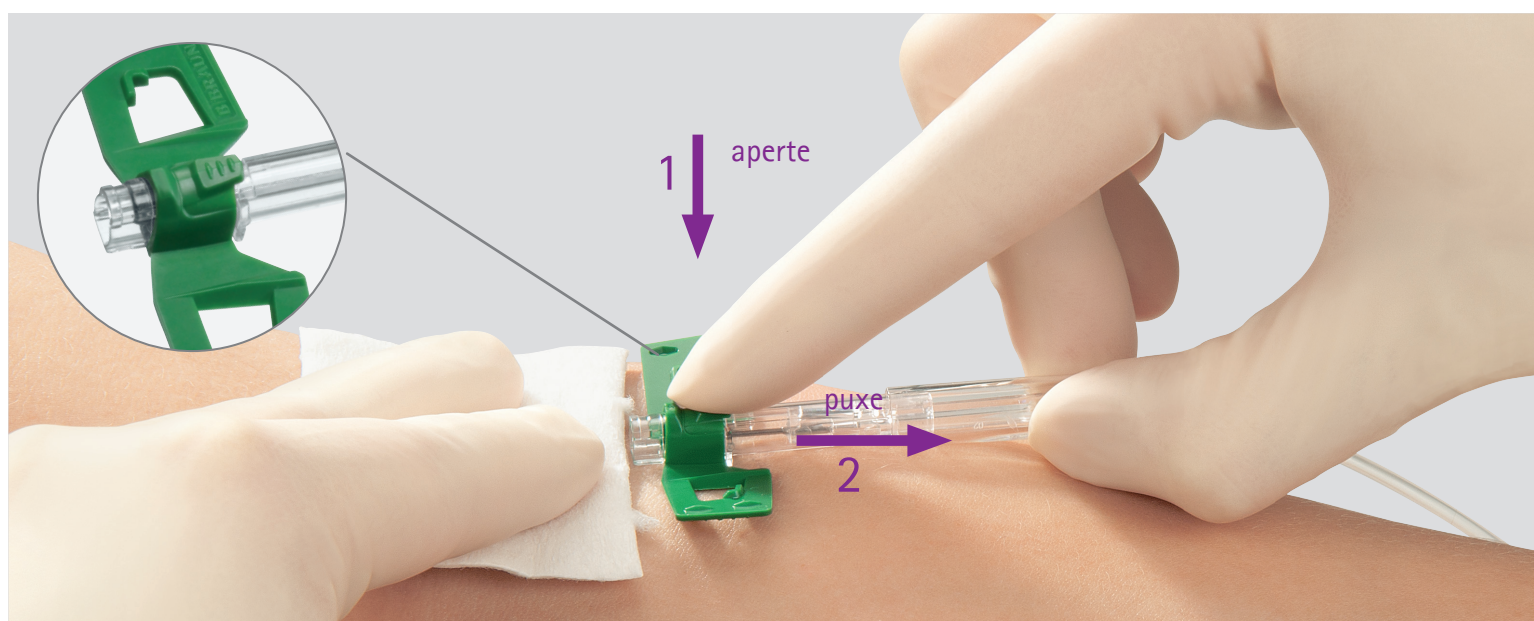

### Ativação do Sistema de Segurança

Cubra o local de punção com uma gaze com uma das mãos. Com a outra mão, ative o sistema de segurança pressionando suavemente o botão na parte superior do dispositivo com o dedo indicador. Puxe com o polegar e o dedo médio até que encaixe e um "clique" seja ouvido.




### Descarte

Mesmo após a ativação do sistema de segurança o Venofix® Safety deve ser descartado em recipientes apropriados para materiais perfurocortantes.

### Sistema de Segurança

- **Aperte** o botão localizado na parte superior do cateter
- **Puxe** para trás
- Um **"Click"** é ouvido

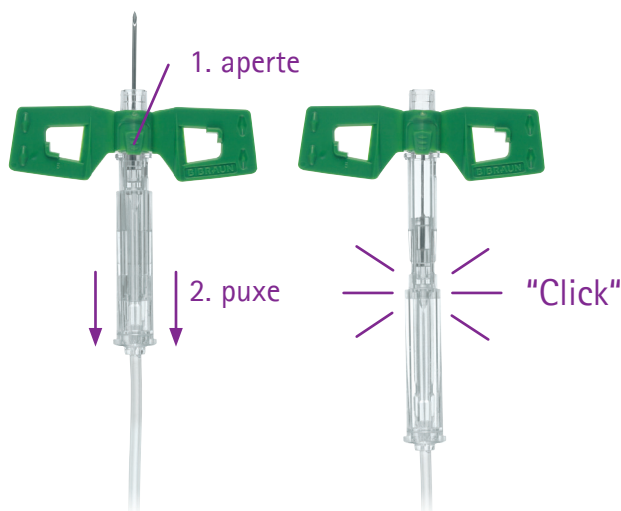

### Características de Segurança

- Ativação simples com uma única mão durante o procedimento.
- Ativação do sistema de Segurança dentro do vaso, minimiza o risco de contaminação com agulha.
- Agulha totalmente protegida após acionamento do sistema de segurança.
- Confirmação audível da proteção da agulha.
- Uma vez acionado o sistema de segurança, este permanece acionado.

Para mais informações sobre Venofix® Safety e Prevenção de risco na Terapia de Infusão, visite: [www.safeinfusiontherapy.com](http://www.safeinfusiontherapy.com)

Agulha IV de Segurança com Abas - Registro ANVISA nº 8.01369.90740

B. Braun Brasil | HC | S.A.C: 0800 0227286 | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:



/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil

