

# DERMADRY CA++



## Descrição

Curativo biointegrável, estéril, de esponja com 90% de Colágeno Tipo 1 e 10% de Alginato de Cálcio. O Colágeno auxilia no processo de cicatrização da ferida, promovendo um ambiente (quimiotático) de atração pelos macrófagos onde o seu acúmulo é o responsável pela formação do tecido de granulação. A associação do Colágeno com o Alginato de Cálcio favorece o crescimento do tecido, devido a sua capacidade em manter o meio úmido realizando a absorção do excesso do exsudato.

## Indicações

Indicado para feridas que podem estar infectadas ou colonizadas, em qualquer fase do processo de cicatrização para todos os tipos de feridas.

## Composição

Colágeno Tipo 1 e Alginato de Cálcio.

## Apresentação

Tamanho do Curativo	Quantidade por caixa
5 x 5 x 0,2 cm	5
10 x 10 x 0,2 cm	5
10 x 20 x 0,2 cm	5

Produto estéril embalado individualmente.

## Instruções de uso

Lavar a ferida com Solução Fisiológica 0,9%. Secar a pele ao redor da ferida. Remover o exsudato e tecido desvitalizado, se necessário. Aplicar Dermadry CA++, no tamanho que melhor se adequa ao leito da ferida e diretamente sobre esta, excedendo as bordas em

aproximadamente 1cm. Ocluir com cobertura secundária. Caso necessário irrigar com soro fisiológico para auxiliar na remoção. Feridas secas devem ser irrigadas previamente com água estéril. Verificar o curativo e a pele circundante frequentemente quanto a sinais de vazamento do exsudato ou sangramento excessivo, evitando assim a maceração da pele.

## Tempo de troca

O curativo deverá ser trocado entre 24 e 72 horas, dependendo da capacidade de absorção do organismo.

## Precauções

Não utilizar em pacientes com sensibilidade ao material de origem bovina. Não deve ser usado para fechamento de incisões cirúrgicas pois pode interferir na cicatrização por ação mecânica ou para implantação cirúrgica.

## Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

## Validade: 2 anos

**Fabricante: Technodry Liofilizados Médicos LTDA-Brasil**

**Registro Anvisa: 80190460012**

**Distribuído por: Bace Comércio Internacional LTFA Farm. Resp.: Tati Guimarães e Oliveira CRF - SP 19.647**

## HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar  
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP  
Telefone: (11) 3168-0226  
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

