

# PHARMAPORE PU IV FRAME STYLE



## Descrição

Película adesiva de filme transparente em poliuretano e permeável ao vapor d'água. Produto estéril.

## Indicação

Fixação e proteção de cateter Intravenoso ou cateter central.

## Contra indicação

Pacientes com hipersensibilidade ao adesivo acrílico.

## Composição

Poliuretano, Adesivo Acrílico, Celulose e Poliéster.

## Apresentação

Código	Tamanho do Produto	Quantidade por caixa
IVFS5057	5 x 5,7 cm	100
IVFS79	7 x 9 cm	100
IVFS85115	8,5 x 11,5 cm	100

Produto estéril embalado individualmente.

## Instruções de uso

Preparar o local do cateter, não aplicar hidratantes na pele, remover produtos oleosos do local da punção e da área de fixação do filme. Se necessário realizar tricotomia, executar técnica asséptica no local de punção conforme protocolo da

instituição e esperar a área secar por completo.

Abri a embalagem do Pharmapore PU IV utilizando técnica asséptica. Remover a janela central com as duas tiras de fixação. Retirar as tiras de fixação, utilize-as nas áreas para fixar o cateter dependendo do tipo nas asas ou no canhão.

Centralizar a área transparente do curativo sobre o local de inserção e retire o papel protetor e fixe o filme, pressione delicadamente. Remover a aba de papel da parte posterior a abertura e fixe pressionando delicadamente. Lentamente, retire a moldura (lateral) de papel ao mesmo tempo alisando as bordas de vestir com seus dedos. Registrar as informações na tira de identificação e aplicar no local.

## Precauções

Não reutilizar. Descartar se a embalagem tiver sido danificada e após o uso. Manter fora do alcance de crianças.

## Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

## Validade: 5 anos

**Fabricante: Pharmaplast S.A. E-Egito**

**Registro Anvisa: 80170319008**

**Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308**

## HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar  
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP  
Telefone: (11) 3168-0226  
comercial@hartmannbr.info - hartmann.info/pt-BR

