

MOLICARE PREMIUMN MEN PAD 4 DROPS



Descrição

MoliCare Premium Men Pad 4 Drops é um absorvente masculino para incontinência urinária com formato anatômico. É composto por uma camada de não tecido laminado Air Active, adesivado para fixação na roupa íntima. Seu núcleo absorvente é composto por 3 camadas, a primeira de polpa de celulose, a segunda de celulose com polímero super absorvente (SAP) que absorve e controlam odores, e a terceira em fibra Curled Fiber, tecnologia que permite a distribuição do fluido para a base do absorvente, bloqueando o seu retorno e contato com a pele, mantendo o pH da pele balanceado. Oferece alta absorção e capacidade de retenção de fluídos. Desenvolvido para ajuste perfeito a anatomia masculina, é discreto, seguro e confortável. Possui sistema anti vazamento nas laterais.

Indicação

Incontinência urinária masculina leve a moderada, especialmente para pacientes ativos e pós cirúrgicos de prostatectomia.

Composição


Não tecido de Polipropileno, Polietileno, Polpa de Celulose, Polímero Superabsorvente (SAP), Curled Fiber.

Apresentação

| Código do produto | Tamanho do produto | Quantidade por pacote |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 168705-8 | 35cm x 19cm | 14 unidades |

Instruções de uso

Retirar a fita adesiva e fixar na roupa íntima com a parte mais estreita para cima. Posicionar o pênis dentro do absorvente. Realizar a troca quando necessário.

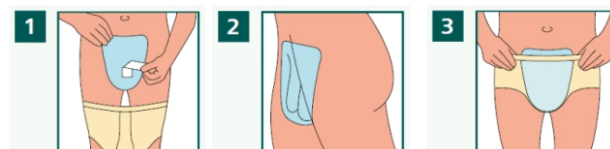

Absorção

475 mL.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Fabricante: Paul Hartmann - França

Número do Processo Anvisa: 25351.345409/2019-11

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenu CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info

